



EAN	Numer przedmiotu	Numer farmaceutyczny	kolor	Zawartość opakowania
4019588528314	0005/2831	16879187	biały	5 kawałek V2
4019588208315	0020/2831	16879170	biały	20 kawałek (4x5 kawałek-pakiet)

TECHNIMASK FFP2

Półmaska filtrująca cząstki
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Najważniejsze funkcje

Certyfikat CE 2016/425/EU, FORCE Certification A/S, 2605 Brøndby (Code Nr. 0200)

Wyposażenie jednorazowego użytku, nie nadaje się do ponownego wykorzystania

Filtrowanie co najmniej 94% wszystkich szkodliwych substancji/cząstek z powietrza o wielkości do 0,6 µm

Wysoki komfort dzięki zastosowaniu elastycznych opasek nausznych i pałąka nosowego

Miękki materiał włókniny zapewnia niskie tarcie ust, nosa i twarzy

Zabezpieczenie przed szkodliwymi dla zdrowia cząstkami na bazie wody i oleju

Brak zabezpieczenia przed substancjami rakotwórczymi i radioaktywnymi, przenoszonymi drogą powietrzną biologicznymi substancjami technologicznymi grupy ryzyka 3 + enzymów

Typowe obszary zastosowania: obróbka metalu, włókna szklanego, miękkiego drewna lub mgły olejowej

Wyprodukowano na terenie Niemiec: przez TechniSat Vogtland GmbH w Schöneck i przez TechniSat Teledigital GmbH w Staßfurt.

Testowano dermatologicznie z wynikiem „bardzo dobry”

TECHNIMASK FFP2

Półmaska filtrująca cząstki

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR



Właściwości masek

Klasa bezpieczeństwa/ klasyfikacja	FFP2
Zgodność z normą	EN 149:2001+A1:2009
Materiał filtra/maski	5 warstw: 2x włóknina, 3x włóknina typu Melt Blown
Materiał pałąka nosowego	Drut w otulinie z tworzywa sztucznego (dwużyłowy)
Materiał opaski nausznej	Taśma elastyczna
Zawór wydechowy	Bez zaworu

BADANIA WEDŁUG EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Całkowita przepuszczalność

Dziesięciu uczestników testu z założonymi ochronnymi maskami oddechowymi wykonuje na bieżni program badawczy.

Podczas testu mierzona jest ilość aerozolu kontrolnego, który wnika przez filtr i wargę uszczelniającą ochronnej maski oddechowej.

Ilość przepuszczonego aerozolu w ośmiu wynikach testów na dziesięć w klasie FFP2 nie może przekraczać 6%. Maksymalna przepuszczalność filtra po podaniu 120 mg oleju parafinowego nie może przekraczać w klasie FFP2 również 6%.

Palność

Cztery ochronne maski oddechowe zostają przeprowadzone zgodnie z ustaloną procedurą przez płomień o temperaturze 800°C (+/- 50°C). Ochronna maska oddechowa nie może palić się po przejściu przez płomień.

Opór oddechowy

Wytwarzany przez ochronną maskę oddechową opór oddechowy jest mierzony przy różnych przepływach powietrza. Dopuszczalny opór jest mierzony w milibarach i w klasie FFP2 nie może przekraczać następujących wartości: wdech 30 l/min – 0,7 mbara; wdech 95 l/min – 2,4 mbara, wydech 160 l/min – 3,0 mbara.

CERTYFIKACJA

Maska TechniMask 2100 FFP2 NR spełnia wymagania EN 149:2001 + A1:2009 i jest opatrzona znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425.

Firma FORCE Certification A/S, 2605 Brøndby (kod nr 0200) jest odpowiedzialna za badanie typu i bieżące monitorowanie produktu.

Maski są produkowane w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym zgodnie z DIN ISO 9001.

Zastosowanie

Zabezpieczenie przed stałymi cząstkami i kroplami średnio szkodliwych lub szkodliwych dla zdrowia substancji.

Limit zastosowania 10-krotne przekroczenie wartości granicznej.

Zakres ochrony jest opisany w treści informacji dotyczącej produktu, normy techniczne oraz obowiązujące zasady zastosowania.

Przechowywanie i transport


Maski FFP2 NR należy przechowywać w zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu producenta, w pomieszczeniach o wilgotności poniżej 80% i temperaturze w pomieszczeniu od -30°C do +70°C.

Okres trwałości masek wynosi 5 lat od daty produkcji.

Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania, zutylizuj maskę ochronną zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Zastosowanie

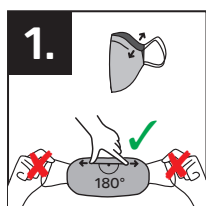

Rozkładaj maskę wyłącznie poprzez odginanie klamry nosowej, w żadnym wypadku nie rozciągaj jej opaskami nausznymi. Upewnić się, że klips nosowy jest całkowicie otwarty (kąt 180°). Przed użyciem sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń i zabrudzeń.



Trzymać maskę oburącz za pętle uszne. Załóż maskę na brodę, a następnie naciągnij maskę na nos. Nakładka na nos powinna znajdować się tuż nad grzbietem nosa. Następnie naciągnij pętle za uszy.



Wyreguluj kształt nakładki na nos, używając palców wskazujących. Wykonaj ruch od środka na zewnątrz.



Sprawdź dopasowanie maski. Maskę powinna ściśle przylegać do twarzy, zakrywając usta oraz nos. W tym celu ustaw dłoń przed maską i wykonaj intensywny wydech powietrza. W przypadku wydostawania się powietrza przez obszar wokół nosa, dopasuj klamrę nosową lub silniej ją dociśnij.